
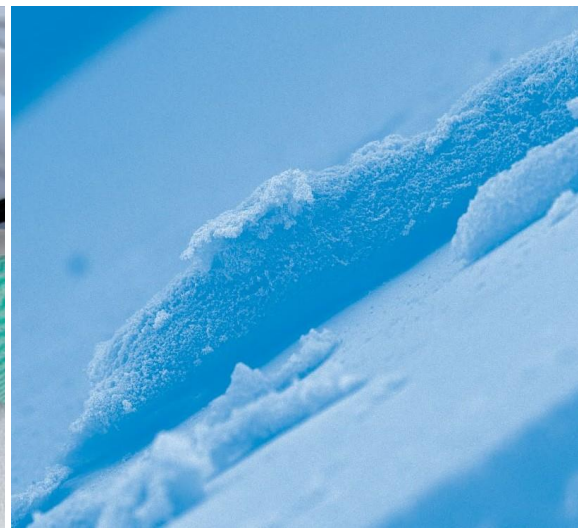


Whiteley
Corporation

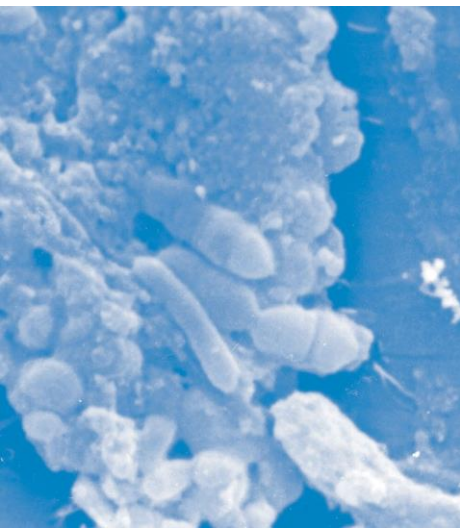

Leading Global Hygiene Product

**Dengan pengalaman lebih dari 80 tahun,
Whiteley Corporation merupakan innovator yang terkemuka
dalam bidang kebersihan dan produk untuk control infeksi**

MATRIX® Wipes

- Tisu basah yang mengandung deterjen **biofilm remover**
- Siap pakai untuk membersihkan (precleaning) scope endoscopy, probe USB, probe TOE, dan alat medis lainnya
- Praktis, hemat waktu dan biaya
- Kemasan : Flat pack isi 80 lembar (19x20 cm)
- Masa Kadaluwarsa : 24 bulan dari tanggal produksi



V-Wipes

- Tisu basah dengan kandungan utama **Benzalkonium Chloride**
- Siap pakai untuk membersihkan permukaan benda medis seperti : meja operasi, troli, dan benda-benda sejenis



- **Tidak mengandung chlorine**
- Kemasan : Flat pack isi 50 lembar (23 x 33 cm)
- Masa kadaluwarsa : 24 bulan dari tanggal produksi

MEDIZYME



- Deterjen enzymatic yang berfungsi untuk membersihkan/mencuci sisa darah, kotoran dan sisa jaringan yang menempel pada alat/instrument operasi ataupun pada scope endoscopy
- Bisa digunakan untuk pencucian alat medis secara manual maupun menggunakan AER (Automatic Endoscope Reprocessor) untuk scope endoscopy
- Petunjuk Penggunaan :
 1. Larutkan 6ml Medizyme per 1L air
 2. Rendam alat/instrument/scope ke dalam larutan tersebut selama 2 menit sebelum dicuci, rendam lebih lama kalau alat terlalu kotor
 3. Buang campuran larutan setelah digunakan
- Kemasan : Galon 5L
- Masa Kadaluwarsa : 24 bulan dari tanggal produksi



Deterjen MATRIX®



- Deterjen standard medis dengan kandungan utama **biofilm remover & surfactant**
- Ampuh untuk membersihkan kotoran biofilm
- Bisa digunakan untuk pencucian alat medis secara manual maupun menggunakan AER (Automatic Endoscope Reprocessor) untuk scope endoscopy
- Petunjuk Penggunaan :
 1. Larutkan 10ml Matrix Detergent ke dalam 1L air atau kelipatannya sesuai kebutuhan
 2. Rendam alat/instrument/scope ke dalam larutan tersebut selama 2 menit sebelum dicuci. Rendam lebih lama (5 menit) apabila alat terlalu kotor
 3. Buang campuran larutan setelah digunakan untuk merendam dan mencuci alat
- Kemasan : Botol 1L
- Masa Kadaluwarsa : 12 bulan dari tanggal produksi

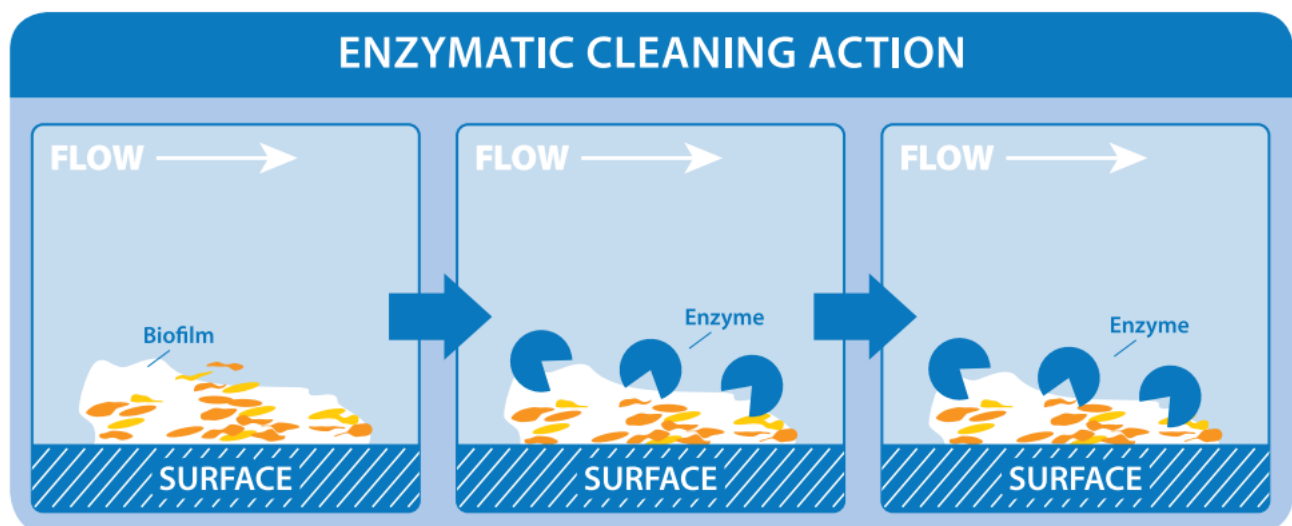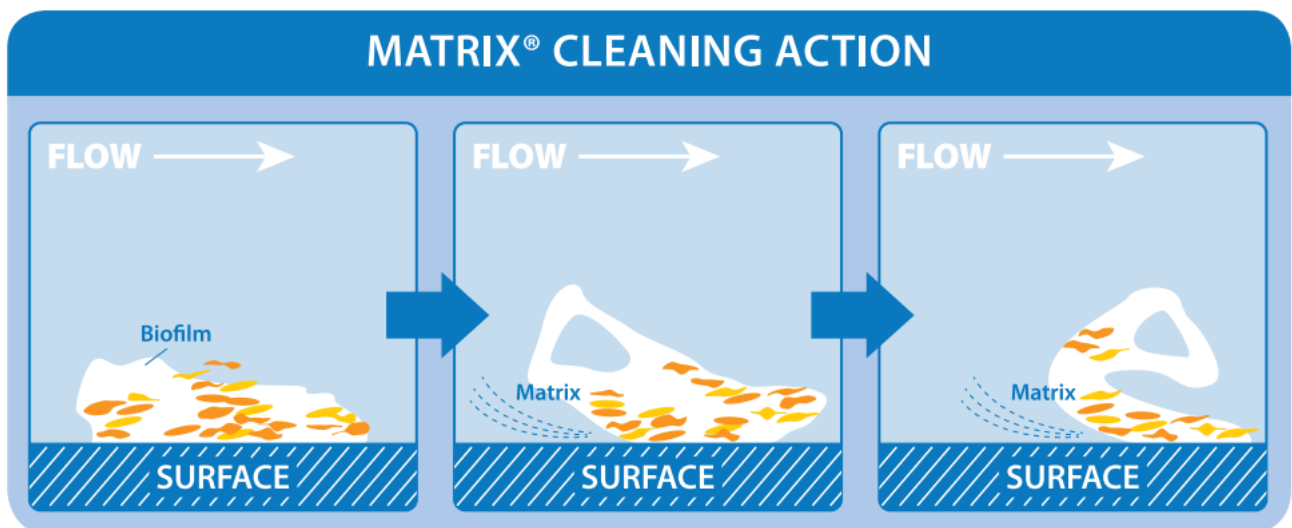

OPAL



- DTT dengan kandungan utama ortho-Phthalaldehyde 5,7g/L
- Untuk mendesinfeksi alat medis dan atau instrumen yang non autoclavable, termasuk scope endoscopy
- Petunjuk penggunaan :
 1. Ready to use, tidak perlu diaktifkan/dilarutkan dengan air, sehingga bisa langsung dituang ke bak perendaman atau kedalam zink DTT pada mesin cuci scope (endoscopy).
 2. Rendam alat/instrument/scope selama 6 menit
 3. Bilas dengan air RO/ air steril
- Cairan OPAL bisa digunakan berulang selama maksimal 28 hari atau berdasarkan hasil tes dari Test Strip OPAL
- Efektif membunuh : spora, bakteri (termasuk bakteri TB), jamur, virus (termasuk virus HIV & virus hepatitis) dan mycobacterium.
- Kemasan: Galon/jerigen @5L
- Masa Kadaluwarsa : 2 tahun (24 bulan) dari tanggal produksi

OPAL TEST STRIP

- Adalah kertas strip untuk melakukan tes/uji kelayakan apakah cairan OPAL masih layak dipakai atau tidak
- Petunjuk penggunaan :
 1. Rendam ujung Test Strip selama 3 detik ke dalam cairan OPAL
 2. Diamkan selama 90 detik
 3. Baca hasilnya (ikut petunjuk dibotol kemasan)
- Kemasan: Botol @50 strip
- Masa Kadaluwarsa : 24 bulan dari tanggal produksi



mJR medison jaya raya

Wisma Tendean, Ground Floor, Jl. Kapt.P.Tendean No.7,
Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Phone : +62 21 7919-4411 ext : 123
Fax : +62 21 7919 4141
Web : www.medisonjayaraya.com